

تعليق المريض

مخطط العلاج
أمثلة

اليوم	IU/يوم	إجمالي عدد IU
1	150	150
2	150	300
3	150	450
4	150	600

اليوم	IU/يوم	إجمالي عدد IU
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

كيفية استخدام Puregon Pen®

هناك عاملين أساسيين لا بد أن تتعرف عليهما:

١. تحميل القلم باستخدام أنبولة.

٢. حقن Puregon.

تبديل الأنبولة:

قبل أو أثناء عملية الحقن، إذا كنت ترى أنه لا يوجد دواء كافٍ في الأنبولة، فسوف يكون لديك خيارين:

١. يمكنك أن تتخلص من الأنبولة وتركب أنبولة جديدة وتعطي الحقنة.

٢. يمكنك إنهاء محتويات الأنبولة الحالية، ثم استكمال المقدار المتبقي من أنبولة جديدة.

اتصل بالطبيب أو الممرضة إذا لم تكن متأكدًا من طريقة إعطاء الحقن! لاحظ أن الأنبولة عادة ما تحتوي على دواء أكثر قليلاً مما هو محدد في العبوة. ولذلك لا يهم كثيرًا إذا لم تلاحظ وجود كمية قليلة جدًا من الدواء في الأنبولة قبل إنهاء الحقن. توضح شاشة إطار الجرعة كيفية فقد الدواء.

إرشادات السلامة

● يجب استخدام Puregon Pen لعلاج شخص واحد فقط.

● يجب استخدام Puregon Pen مع أنبولات Puregon فقط.

● قم بتخزين القلم مع الأنبولات في الثلاجة (بدرجة حرارة +2 - +8 درجة سلزية) أو في درجة حرارة الغرفة العادية (بحد أقصى ٢٥ درجة سلزية) بحد أقصى لمدة ٣ أشهر.

كيفية إعداد الحقنة:

١. أدر القلم لفصله.

٢. أدخل الأنبولة وأدر القلم لإغلاقه.

٣. أدر الإبرة للدخول بإحكام وأزل غطاء الإبرة.

٤. إذا لم تتمكن من رؤية قطرة، أدر مقبض ضبط الجرعة بمقدار نفرة واحدة واضغط على زر الحقن.

٥. اضبط الزر وفقًا للجرعة الموصى بها وذلك بتدوير مقبض ضبط الجرعة بعكس اتجاه الساعة.

٦. إذا قمت عن غير عمد بتدوير مقبض ضبط الجرعة (وفقًا للوحدات العالمية) بحيث تجاوزت نقطة الجرعة الموصى بها، فلا تدر المقبض للخلف. بدلاً من ذلك، استمر في تحريكه بعكس اتجاه الساعة لأقصى مدى ممكن.

٧. بعد ذلك، أدر زر الحقن بالكامل وأدر مقبض ضبط الجرعة حسب موضع الجرعة الصحيح. وبهذه الطريقة، سوف تتجنب أي خسارة في الدواء.

كيفية إعطاء الحقنة:

يتم حقن Puregon في البطن أسفل الجلد في المنطقة أسفل الصرة

١. لا تحقن في نفس المكان كل مرة، وبدلاً من ذلك انتقل لمكان آخر.

٢. أرفع مكان الحقن بالضغط على الجلد بين الإبهام والسبابة. باستخدام اليد الأخرى، أدخل الإبرة بالكامل بالزاوية الصحيحة في الجلد. اضغط على زر الحقن بالكامل وانتظر خمس ثوانٍ.

٣. بعد ذلك، انزع الإبرة باستخدام غطاء الإبرة. بعد ذلك، تخلص من الإبرة وفقًا للإرشادات التي توصي بها العيادة. إذا كنت قد قمت بحقن الجرعة بأكملها، فسوف ترى الرقم «صفر» في شاشة إطار الجرعة.

