

Anwendung des Puregon Pen®

Es gibt zwei grundlegende Dinge, die Sie lernen müssen:

1. Setzen Sie eine Ampulle in den Pen.
2. Injizieren Sie Puregon.

Vorbereitung der Injektion:



1. Schrauben Sie den Pen auseinander.



2. Legen Sie die Ampulle ein und schrauben Sie den Pen zu.



3. Schrauben Sie die Nadel fest ein und entfernen Sie die Nadelschutzkappe.



4. Wenn kein Tröpfchen aus der Nadel austritt, drehen Sie die Dosierschraube eine Rasterung weiter und drücken Sie den Injektionsknopf.



5. Stellen Sie Ihre empfohlene Dosis ein, indem Sie die Dosierschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.



6. Falls Sie die Dosierschraube (IE) versehentlich über die empfohlene Dosiereinheit hinaus gedreht haben, drehen Sie die Dosierschraube nicht rückwärts, sondern drehen Sie sie weiter gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.



7. Drücken Sie dann den Injektionsknopf vollständig hinein und drehen Sie die Dosierschraube bis zur korrekten Dosiereinheit. So vermeiden Sie, dass Arzneimittel verloren geht.

Eine Injektion verabreichen:

Puregon wird knapp unterhalb des Nabels in die Bauchhaut injiziert.



1. Injizieren Sie nicht jedes Mal an der gleichen Stelle, sondern ändern Sie die Injektionsstellen ein wenig.



2. Heben Sie die Injektionsstelle an, indem Sie die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger pressen. Stechen Sie mit der anderen Hand die Nadel vollständig in einem rechten Winkel zur Haut ein. Drücken Sie den Injektionsknopf vollständig hinein und warten Sie fünf Sekunden.



3. Schrauben Sie anschließend die Nadel mit Hilfe der Nadelschutzkappe ab. Entsorgen Sie die Nadel entsprechend den Anweisungen, die Sie von der Klinik erhalten haben. Wenn Sie die gesamte Dosis injiziert haben, sollte die Zahl ‚Null‘ auf dem Dosierfenster angezeigt werden.

Wechseln der Ampulle:

Wenn Sie vor oder während der Injektion feststellen, dass nicht genügend Arzneimittel in der Ampulle enthalten ist, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Sie können die Ampulle wegwerfen, eine neue einlegen, und die Injektion verabreichen.
2. Sie können den Inhalt der Ampulle aufbrauchen und anschließend die fehlende Menge aus einer neuen Ampulle verabreichen.

Wenn Sie unsicher sind, wie die Injektion verabreicht wird, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihre Krankenschwester. Beachten Sie, dass immer etwas mehr Arzneimittel in der Ampulle ist, als auf der Packung angegeben. Es macht nichts, wenn Sie erst zu spät feststellen, dass sich zu wenig Arzneimittel in der Ampulle befindet. Das Dosierfenster zeigt an, wie viel Arzneimittel noch fehlt.

Sicherheitsvorschriften

- Der Puregon Pen darf nur für die Behandlung einer einzelnen Person genutzt werden.
- Der Puregon Pen darf nur mit Puregon-Ampullen verwendet werden.
- Lagern Sie den Pen und die Ampullen in einem Kühlschrank (+2 – +8 °C) oder bei Raumtemperatur (maximal +25 °C) für maximal 3 Monate.