

Forma de utilizar Puregon Pen[®]

Son dos operaciones principales las que tiene que aprender:

1. Cargar el lápiz con una ampolla.
2. Inyectar Puregon.



Prepare así la inyección:

1. Desmonte el lápiz desenroscándolo.
2. Ponga la ampolla y monte el lápiz enroscándolo.
3. Fije la aguja enroscándola y quite la protección de la aguja.
4. Si no se ha visto ninguna gota, gire un paso el botón de dosificación y presione el botón de inyección.
5. Ajuste su dosis ordinaria girando el botón de dosificación en sentido contrario a las agujas del reloj.
6. Si, por error, girara el botón de dosificación pasando de su dosis ordinaria, no gire el botón hacia atrás. En lugar de ello, siga girando el botón de unidades internacionales (UI) todo lo que pueda.
7. Después, presione completamente el botón de inyección y gire el botón de dosificación hasta la dosis correcta. De esta forma evitará la pérdida de medicamento.



Inyecte así:

Puregon se inyecta en el vientre, bajo la piel por debajo del ombligo.



1. No inyecte exactamente en el mismo punto cada vez; disperse algo las inyecciones.
2. Eleve el punto de inyección apretando la piel entre los dedos pulgar e índice. Con la otra mano, meta toda la aguja en posición perpendicular respecto a la piel. Presione completamente el botón de inyección y espere cinco segundos.
3. Después, desenrosque la aguja con ayuda de la protección de la misma. Deseche luego la aguja según las instrucciones de su clínica. Si ha inyectado toda la dosis, deberá aparecer la cifra cero en la ventanilla de la dosis.

Cambio de ampolla

Si, antes de la inyección o durante la misma, nota que no queda medicamento suficiente en la ampolla, tiene dos opciones:

1. Desechar la ampolla, poner una nueva y, después, proceder a inyectar.
2. También puede terminar el contenido de la ampolla y, después, inyectar la cantidad restante de la dosis de una ampolla nueva.

¡Contacte con su médico o enfermera si no está segura de cómo debe proceder! Tenga en cuenta que, en la ampolla, siempre hay algo más de medicamento que lo indicado en el envase. No importa que usted no se dé cuenta de que queda demasiado poco medicamento en la ampolla hasta después de la inyección. La ventanilla de la dosis muestra la cantidad de medicamento que falta.

Instrucciones de seguridad

- Puregon Pen debe utilizarse únicamente para el tratamiento de una persona.
- Puregon Pen sólo puede utilizarse para ampollas de Puregon.
- Conserve el lápiz con ampolla en la nevera (+2 – +8°C) o a temperatura ambiente (como máximo, +25°C) un máximo de tres meses.