

Mode d'emploi de Puregon Pen[®]

Les deux principales étapes à connaître :

1. Charger une cartouche dans le stylo injecteur.
2. Injecter Puregon.



Préparation de l'injection :

1. Dévissez le corps du stylo.
2. Chargez la cartouche et revissez le stylo.
3. Fixez l'aiguille et enlevez les capuchons protecteurs.
4. Si vous ne voyez aucune gouttelette, tournez le sélecteur de doses UI et poussez le bouton d'injection.
5. Sélectionnez la dose prescrite en tournant le sélecteur de doses dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
6. Si, par erreur, vous dépassez la dose correcte, n'essayez pas de tourner le sélecteur de doses dans le sens inverse mais continuez dans le même sens jusqu'à ce qu'il soit en butée.
7. Enfoncez complètement le bouton d'injection et tournez le sélecteur jusqu'à la bonne dose. Cela vous évitera les pertes de médicament.



Injection :

Puregon s'injecte dans l'abdomen, sous le nombril.



1. N'injectez pas la solution exactement au même endroit à chaque fois mais variez les zones d'injection d'un jour sur l'autre.
2. Pincez la zone d'injection entre deux doigts. Avec l'autre main, insérez franchement la totalité de l'aiguille perpendiculairement à la peau. Enfoncez complètement le bouton d'injection et attendez cinq secondes avant de retirer l'aiguille de la peau.
3. Enlevez l'aiguille à l'aide du capuchon protecteur, puis jetez-la conformément aux instructions de la clinique. Si vous avez injecté toute la dose, le chiffre 0 apparaît dans la fenêtre de dosage.

Remplacement de la cartouche

Si vous vous rendez compte, avant ou après l'injection, qu'il n'y a pas assez de médicament dans la cartouche, vous avez deux possibilités :

1. Jeter la cartouche et en insérer une nouvelle, puis effectuer l'injection.
2. Vider la cartouche puis prélever la quantité restante sur une nouvelle cartouche.

En cas de doute, contactez votre médecin ou votre infirmière. Notez qu'il y a toujours un peu plus de médicament dans la cartouche que ne l'indique l'emballage. Si vous ne voyez pas qu'il reste trop peu de médicament dans la cartouche après l'injection, ce n'est pas grave. La fenêtre de dosage du stylo indique la quantité manquante de médicament.

Précautions

- Le Puregon Pen est destiné seulement à l'usage d'une seule personne
- À utiliser uniquement avec les cartouches de Puregon.
- Conservez votre stylo Puregon Pen[®] au réfrigérateur (+2 à +8 °C) ou à température ambiante (+25 °C au maximum) pendant trois mois au plus.