

Как пользоваться шприц-ручкой Пурегон®

Вам необходимо обучиться двум основным действиям:

1. загружать ампулу в шприц-ручку;
2. вводить Пурегон.



Как приготовить инъекцию:

1. Раскрутите шприц-ручку.
2. Вставьте ампулу и плотно закрутите шприц-ручку.
3. Плотно прикрутите иглу и снимите с нее колпачок.
4. Если на конце не появилась капля, поверните головку регулировки дозы, превышая рекомендованную дозу на один щелчок и нажмите кнопку введения дозы.
5. Установите головку регулировки в положение, соответствующее рекомендованной вам дозе. Для этого поверните головку на один щелчок против часовой стрелки.
6. Если вы случайно повернули регулирующую головку и пропустили рекомендованную дозу, не вращайте головку в обратную сторону. Вместо этого продолжайте вращать головку против часовой стрелки до упора.
7. Затем, вдавите кнопку введения инъекции до упора; после этого можно повернуть регулирующую головку в надлежащее положение, задав рекомендованную дозу. Следование приведенным выше инструкциям поможет избежать потери лекарства.



Как ввести инъекцию:

Пурегон вводится под кожу в области живота (немного ниже пупка).



3. Не следует вводить препарат все время в одно и то же место; чередуйте места введения препарата от инъекции к инъекции.



1. Указательным и большим пальцами соберите в складку кожу в месте введения. Удерживая шприц другой рукой, полностью введите иглу в кожу под правильным углом. Отожмите кнопку введения инъекции до упора и подождите пять секунд.



5. Открутите иглу, взявшись за колпачок. Утилизируйте иглу в соответствии с инструкциями, которые вам дали в медицинском учреждении. Если вы ввели себе всю запланированную дозу, на дисплее дозы отобразится цифра «0».

Замена ампулы:

В случае, если до или во время инъекции вы заметите, что в используемой ампуле недостаточно лекарства, необходимо следовать одной из двух процедур.

1. Вы можете извлечь старую ампулу, вставить на ее место новую и выполнить инъекцию.
2. Вы можете ввести себе весь раствор из старой ампулы, а затем ввести недостающее количество препарата из новой ампулы.

В случае, если вы испытываете затруднения с введением лекарства, ОБРАТИТЕСЬ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ВАС МЕДИЦИНСКОМУ РАБОТНИКУ. Помните о том, что в ампуле всегда содержится немного больше лекарства, чем заявлено на упаковке. Если по окончании инъекции вы заметите, что в ампуле слишком мало лекарства, не беспокойтесь: это не страшно. Шприц-ручка содержит устройство, сообщающее о том, сколько лекарства не хватает.

Техника безопасности

- Шприц-ручка является индивидуальным устройством, предназначенным только для одного пациента.
- В шприц-ручке можно использовать только ампулы с Пурегоном.
- Шприц-ручку с ампулами следует хранить в холодильнике (при температуре (от +2 до +8 °C)). Лекарство также можно хранить при комнатной температуре (до +25 °C) в течение не более трех месяцев.

Режим лечения

Для регистрации инъекций по суткам воспользуйтесь приведенным ниже листком-расписанием.

После того, как вы запишете информацию об инъекциях, проведенных в первые сутки, скопируйте значение из последней колонки («Остаток пурегона») на следующую строку в колонку «Количество Пурегона в картридже». На вторые сутки вычтите значение колонки «Назначенная суточная доза» из значения колонки «Количество Пурегона в картридже» и запишите полученную цифру в последнюю колонку. В последующие дни пользуйтесь расписанием по приведенной схеме.

	Дата	Назначенная суточная доза (МЕ/сутки)	Количество Пурегона® в картридже	Остаток пурегона®
Пример {	3 июня 2009 года	150 МЕ	900 МЕ	750 МЕ
			750 МЕ	